

硬性角膜接触镜酶清洁剂

使用说明

产品名称：硬性角膜接触镜酶清洁剂（Boston ONE STEP Liquid Enzymatic Cleaner）

型号规格：0.3ml, 1ml, 2.4ml, 5ml

医疗器械注册证编号：国械注进 20163161908

产品技术要求编号：国械注进 20163161908

说明书修订日期：2021 年 10 月

产品特点：每周使用博士伦 Boston™ 硬性角膜接触镜酶清洁剂是有效去除硬性透气性角膜接触镜（氟硅丙烯酸酯和硅丙烯酸酯硬性角膜接触镜）上蛋白质沉淀的一种简单而又方便的方法。这种清洁剂，是无味的除蛋白清洁液，与消毒步骤一起就在镜盒中发挥作用，它代替去蛋白酶片并且不需要单独的镜盒。它可以与 Boston ADVANCE™ Comfort formula Conditioning Solution 一起使用。

产品成分：一种无菌溶液，含有碱性蛋白水解酶（枯草杆菌蛋白酶）活性成分和丙三醇，及硼酸、硼酸钠、氢氧化钠、纯水。

开封有效期：0.3ml 包装为一次性使用；其它包装开瓶后使用 180 天。

有效期：本产品未开封可保存两年，请在标注失效期前使用。

本产品为无菌加工产品。

适应范围：

用于在护理过程中，每周一次对氟硅丙烯酸酯和硅丙烯酸酯硬性透气性角膜接触镜进行去蛋白清洁。

禁忌症： 如果您对本产品的任何成分过敏，请不要使用本清洁剂。

不能用于软性（亲水性）角膜接触镜

使用方法(每周使用):

1. 日常清洁（使用 Boston ADVANCE™ 清洁液）冲洗后，把镜片放入镜盒并充满新鲜的 Boston ADVANCE Comfort Formula Conditioning Solution。重要的是镜盒必须充满新鲜的护理液以确保适度的稀释 Boston™ 硬性角膜接触镜酶清洁剂，以减少产生刺激的机会。
2. 每个镜盒中加入 2 滴 Boston™ 硬性角膜接触镜酶清洁剂。在配戴前浸泡镜片至少 4 小时



(或者过夜), 以确保适度的清洁和消毒。总是使用新鲜的护理液浸泡和贮存镜片。

3. 把镜片从镜盒中取出后, 使用 Boston Conditioning Solution 揉搓并冲洗镜片大约 5 秒钟, 以确保酶清洁剂已彻底从镜片上冲洗掉。不要使用自来水对镜片进行最后的冲洗。
4. 如果需要, 使用新鲜的润滑液来湿润镜片以进一步缓冲, 然后戴入。
5. 每次使用后, 立即倒掉镜盒中的护理液, 并用无菌消毒护理液彻底清洁镜盒内部, 然后风干。
6. 仔细观看本配戴中的警告和注意。

警告:

不要直接入眼。如果误用本清洁剂可能会产生刺激。如果没有彻底冲洗掉去蛋白清洁剂就戴上镜片, 则可能发生眼红或者刺激症状。如果进入眼内, 立即摘下镜片并用冷的新鲜水冲洗眼睛直到所有去蛋白清洁剂彻底从眼内去掉。如果问题仍然存在, 请与您的眼保健专家联系。为了避免污染, 决不用您的手触摸护理液瓶口或者接触其它任何表面。不用时请把瓶口拧紧。角膜接触镜和护理液, 如果不正确处理, 可能被能引起眼部感染的普通细菌污染。使用污染的护理液或者配戴已污染的或者损坏的角膜接触镜可能导致眼睛的严重损害和视力丧失。角膜接触镜和镜片护理产品的问题可能导致眼睛严重伤害, 其根本在于您要按照眼保健专家的指导和所有标签上的说明来正确使用您的镜片和镜片护理产品。

眼部问题, 包括角膜溃疡, 可以快速进展并可以导致视力丧失。因此, 如果您出现眼部不适, 过度流泪, 视力改变, 或者眼红, 立即摘下您的镜片并立即与您的眼保健专家联系。

镜盒护理:

- 使用新鲜的无菌消毒护理液用手指擦拭清洁镜盒。不要使用水。清洁后应使用新鲜的无菌护理液(不要用水)冲洗, 并建议使用新鲜、干净的纸巾擦拭镜盒。避免使用后没有任何额外的清洁方法就风干或再次盖上镜盒盖。如果风干, 请确保在风干前没有残留溶液。
- 至少每 3 个月更换一次镜盒, 或根据眼科医生的指示进行更换。
- 隐形眼镜镜盒可能是微生物生长的一个来源。

警示:

- 请勿使用水或其他非无菌溶液储存您的接触镜或冲洗镜盒。仅可使用新鲜的多功能接触镜护理液, 以免污染接触镜或镜盒。使用非无菌溶液可导致严重感染、视力下降或失明。

涉水活动:

- 配戴时, 接触镜不得与水接触。
- 请向您的眼视光医师咨询有关涉水活动期间配戴接触镜的建议。

重要安全信息:

- 在使用时请始终遵守产品说明。否则可能导致视力下降。
- 定期拜访您的眼视光医师。
- 请勿使用自来水、瓶装水或唾液处理镜片或镜盒。
- 仅使用新鲜护理液溶液清洁和消毒接触镜。
- 在每次消毒操作后请倒净镜片盒内的任何残余溶液。
- 生理盐水或润眼液对镜片无消毒作用。
- 按照使用说明经常更换您的护理液、镜片和镜盒。
- 请勿触摸容器顶端至任意表面以避免污染。
- 请勿采用加热（热）消毒。

注意:

- 确保适当的卫生，正确地处理角膜接触镜和接触镜护理液，总是小心按照标签上的说明使用。
- 不要直接入眼使用
- Boston™ 硬性角膜接触镜酶清洁剂总是与新鲜的 Conditioning Solutions（湿润、浸泡和消毒）过程中一起使用来清洁和消毒镜片。
- 决不仅用 Boston™ 硬性角膜接触镜酶清洁剂浸泡镜片。
- 在容器上标注的有效期内使用。
- 决不重复使用溶液。
- 总是在护理镜片前洗手。
- 在室温下贮存。
- 决不在每个镜盒中放入超过 2 滴的 Boston™ 硬性角膜接触镜酶清洁剂。
- 总是在戴镜前用 CONDITIONING SOLUTION 彻底揉搓并冲洗镜片。
- 远离儿童放置

不良反应，下述问题可能发生:

眼刺痛，烧灼感，刺激感

流泪

异常眼部分泌

眼红

视觉清晰度（视觉质量）下降

视物模糊

畏光

眼干

如果您注意到任何上述状况发生，立即摘下并检查镜片。如果症状消失并且镜片看起来没有损伤，则彻底清洗，冲洗并消毒镜片，然后再戴入。如果问题继续或者如果镜片看起来有损

伤，不要再戴。立即与您的眼保健专家联系。如果上述任何问题发生，则可能发生严重的状况比如感染，角膜溃疡，新生血管或者虹膜炎。立即去找专家鉴别问题并治疗以避免严重的眼部损伤发生。

0.3ml 包装仅在标签及一次性容器完整时使用；其它包装如果瓶箍圈已破裂或者丢失则不要使用。

生产日期及失效期：见外包装

注册人和生产企业名称：博士伦有限公司 Bausch & Lomb Incorporated

注册人和生产企业住所：1400 North Goodman Street Rochester, NY 14609.

生产地址：8507 Pelham Road Greenville, SC 29615, USA

代理人/售后服务单位名称：博士伦（上海）贸易有限公司

代理人/售后服务单位住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 358 号第四层 405 部位

博士伦服务热线：400-060-9855

仅供电商页面展示

