

硬性透气角膜接触镜清洁液

使用说明书

产品名称：硬性透气角膜接触镜清洁液 (Boston Advance Cleaner)

规格型号：10ml, 30ml, 10mlx2, 10mlx3, 10mlx4

说明书修订日期：2021 年 5 月

产品说明：硬性透气角膜接触镜清洁液可松解并去除油脂、顽固沉积物和细胞碎屑等造成您角膜接触镜配戴不适的物质。

产品成分：硬性透气角膜接触镜清洁液为无菌、浓缩、均匀的表面活性剂，含有烷基乙醚硫酸钠、烷基酚乙氧基化物、三季可基磷脂及水合硅胶作为清洁剂，含二氧化钛、氯化钠、磷酸钠和纯水。

使用方法：

硬性透气角膜接触镜清洁液氟硅丙烯酸酯及硅丙烯酸酯硬性透气性角膜接触镜清洗液



1. 用非刺激性肥皂清洗双手



3. 用硬镜专用盐溶液或护理液彻底冲洗去除清洗液痕迹



2. 在您手掌内用 2~4 滴 Boston ADVANCE 清洁液擦洗角膜接触镜两面共 20 秒



4. 将角膜接触镜放入镜盒内并装满新鲜的硬性透气角膜接触镜舒适配方的多功能护理液。配戴前浸泡角膜接触镜四小时以上（或过夜）
5. 开封 180 天后丢弃。请将开瓶日期记在瓶标签空白处。

- 每周去除蛋白质，请用 Boston One Step Liquid Enzymatic Cleaner 硬性角膜接触镜酶清洁剂。
- 应经常更换角膜接触镜盒以防止可能的微生物感染及眼部刺激。

重要提示：请仔细阅读并保存此说明以备将来使用

适应症（用于）：硬性透气角膜接触镜清洁液用于镜片每次使用后及护理（湿润、浸泡、消毒）前清洁硬性透气性角膜接触镜（氟硅丙烯酸酯和硅丙烯酸酯硬性角膜接触镜）。用于硬性接触性和角膜塑形镜。

禁忌（禁用于）：如您对产品中某成分过敏，请勿使用。禁用于软性（亲水性）角膜接触镜。

为了保证您正确使用该产品，博士伦清洁液有红色瓶嘴以提示该产品不可入眼。

警告：该产品严禁与眼睛接触，为了避免误用造成眼睛损害，产品中加入了二氧化钛指示剂。如在后续的镜片护理程序中，未彻底清除掉该清洁液的残留，镜片表面仍会有白色显色。

如清洁液未经充分冲洗而残留于角膜接触镜上，将导致眼部刺激。如不慎滴入眼内，请立即取下角膜接触镜并用清洁自来水冲洗眼部，直至清洗液从眼内完全去除。

为避免污染，请避免瓶口接触手或其他表面。不使用时请保持密封。

角膜接触镜和溶液如果使用不当，可能被造成眼部感染的常见细菌污染。使用被污染的溶液或配戴

被污染的或受损的接触镜，可能对眼睛及视力造成严重损害。

角膜接触镜及接触镜护理用品的问题可以对眼睛造成严重伤害。正确使用角膜接触镜及其护理用品，必须遵从眼科专业人士指导及产品标签说明。

眼部疾病，包括角膜溃疡，可以迅速进展并导致视力丧失。因此如您感觉眼部不适、大量流泪、视力改变或眼红，请立即停止配戴角膜接触镜并立即咨询眼科专业人士。

注意：为了保证角膜接触镜及护理液的正常卫生使用，请仔细按标签指导使用。

- 请勿重复使用此溶液
- 请使用新鲜护理液浸泡及保存角膜接触镜
- 使用角膜接触镜前请洗手
- 室温保存，避免冰冻
- 每次配戴角膜接触镜后请用热水彻底清洁镜盒内面并风干
- 在失效期前使用
- 请勿用清洗液浸泡角膜接触镜
- 清洗后请用硬镜专用盐溶液或护理液彻底冲洗角膜接触镜
- 远离儿童

副作用：

可能出现下述症状：

- 眼部刺激、烧灼感、痒感；
- 眼部大量流泪；
- 眼部异常分泌物；
- 眼红；
- 视觉清晰度（视觉质量）下降；
- 视物模糊；
- 畏光；
- 眼干；

如果您感到上述任何情况，请立即摘下并检查接触镜。如不适感消失且接触镜完好，请彻底清洁、冲洗并消毒接触镜后重新配戴。如不适感仍存在或接触镜损坏，请勿重新配戴。立即咨询眼科专业人士。如果出现上述任何症状，可能出现感染、角膜溃疡、新生血管生成或虹膜炎。请立即寻求专业诊断和治疗，以避免眼部严重损害。

包装及失效期：硬性透气角膜接触镜清洁液为瓶装。纸盒为外包装。瓶颈部密封环处印有一系列数字及失效期。生产日期和失效日期见外盒包装。

灭菌方式及包装损坏处理：产品经无菌加工，如密封环破损或丢失，请勿使用。

Bausch & Lomb、Boston、Boston ADVANCE 及 BECAUSE YOUR EYES ARE SO IMPORTANT 为博士伦公司注册商标。

生产企业/注册人名称：Bausch & Lomb Incorporated 博士伦有限公司

生产企业/注册人住所：1400 North Goodman Street Rochester, NY 14609, USA

生产地址：Bausch & Lomb Incorporated, 8507 Pelham Road, Greenville, SC 29615, USA.

医疗器械注册证编号：国械注进 20163161906

产品技术要求编号：国械注进 20163161906

代理人/售后服务单位名称：博士伦（上海）贸易有限公司

代理人/售后服务单位住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 358 号第四层 405 部位

博士伦服务热线：400-060-9855



仅供电商页面展示

