

请仔细阅读并保留此包装说明书，以备日后参考。建议所有眼视光医师与患者一同审阅此信息。

护理、清洗、除蛋白、消毒、冲洗和保存。

产品名称：隐形眼镜多功能护理液（**NNR06 Multi-purpose Solution**）

型号：BL-3100-NNR06

规格：60ml,100ml,120ml,240ml,300ml,355ml,500ml,
100mlx2,100mlx3,100mlx4,120mlx2,120mlx3,120mlx4,
300ml+60ml,300ml+100ml,300ml+120ml,
355ml+60ml,355ml+100ml,355ml+120ml,
500ml+60ml,500ml+100ml,500ml+120ml,
300ml+60mlx2,300ml+100mlx2,300ml+120mlx2,355ml+60mlx2,355ml+100mlx2,
355ml+120mlx2,500ml+60mlx2,500ml+100mlx2,500ml+120mlx2,
300mlx2+60ml,300mlx2+100ml,300mlx2+120ml,
355mlx2+60ml,355mlx2+100ml,355mlx2+120ml,
500mlx2+60ml,500mlx2+100ml,500mlx2+120ml,
300ml+120ml+60ml,355ml+120ml+60ml,500ml+120ml+60ml,
300ml+100ml+60ml,355ml+100ml+60ml,500ml+100ml+60ml,
60mlx2,60mlx3,60mlx4,240mlx2,240mlx3,
60ml+240ml,60mlx2+240ml,60ml+240mlx2

使用说明：

完成以下简单步骤以对镜片进行护理、清洗、除蛋白和消毒：

步骤 1：在接触镜每面各滴至少 3 滴 **NNR06 多功能护理液**，并轻轻揉搓每面各 20 秒。

步骤 2：用 **NNR06 多功能护理液** 彻底冲洗镜片每面各 5 秒。

步骤 3：将清洗后的接触镜置于镜盒内，并倒入新鲜 **NNR06 多功能护理液**。至少浸泡 4 小时。始终使用新鲜护理液，每次使用后倒掉镜盒内的护理液。

现在您的镜片可以配戴了。如果接触镜上残留任何碎屑，请在配戴前用 **NNR06 多功能护理液** 进行冲洗。

您应始终遵守眼视光医师的相关指示。根据您的个体泪液情况和镜片配戴规律，您的眼视光医师可能建议更适合您的护理步骤及使用其它相关产品。

如果您不立即配戴接触镜，请将其存放于一个密闭镜盒内。请勿用生理盐水代替本品储存镜片。生理盐水不具有消毒作用。

镜片在配戴前可一直储存在密闭盒内，最多不超过 30 天。如果您镜片储存时间超过 30 天，必须在配戴前用新鲜 **NNR06 多功能护理液** 进行清洗和消毒。

成分：

无菌等渗溶液，含泊洛沙胺 1107、泊洛沙姆 181、双甘氨酸、柠檬酸钠、硼酸、硼酸钠、乙二胺四乙酸二钠、氯化钠、纯化水，以及作为三重消毒系统的防腐剂（0.00005% 聚氨基丙基双胍、0.00015% 聚季铵盐-1 和 0.0002% 己联双辛胍二盐酸盐）。

产品性能：

每日使用 **NNR06 多功能护理液**可溶解软性接触镜上的蛋白质并清洗、疏松和去除蛋白质膜、碎屑和沉积物。**NNR06 多功能护理液**有助于阻止镜片表面刺激性沉积物的形成。它可杀灭镜片上的有害微生物。**NNR06 多功能护理液**还可用于冲洗镜片。

NNR06 多功能护理液的清洁系统含有两种表面活性剂双 P 分子，有效去除镜片表面的蛋白质和尘垢等沉淀物，保持镜片清洁，同时加强镜片表面湿润性，二十小时保湿保持配戴的舒适感。其含有的三重消毒系统，杀菌消毒，有效抑制致病微生物，为接触镜安全配戴保驾护航。专利配方的缓冲系统，可增强消毒效果，保持酸碱平衡。

杀灭微生物类别：

对于大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和绿脓杆菌的杀灭率达到并超过 99.90%；对于白色念珠菌和茄科镰刀霉菌的杀灭率达到并超过 90.00%。

适用范围：

适用于软性角膜接触镜（含硅水凝胶镜片）的日常护理、清洁、去除蛋白沉淀物、冲洗、消毒杀菌和储存。

禁忌症（不使用的理由）：

尚不存在已知与 **NNR06 多功能护理液**的使用相关的禁忌症。但是，如果您对此产品中的任何成分过敏，请不要使用。

警告：接触镜和镜片护理产品的任何问题可产生角膜感染和/或溃疡并导致视力下降。务必遵守您眼视光医师的指示，同时按照说明合理使用镜片和镜片护理产品，包括镜片盒。

眼部问题，包括角膜溃疡在内，可发展迅速并导致视力下降。日戴型镜片规定不能配戴过夜，在睡觉时不得配戴。临床研究表明，当配戴这些镜片过夜时，严重不良反应的风险会增加。长戴型镜片应按照眼视光医师规定的时间表定期摘下进行清洗和消毒或者抛弃和更换。临床研究表明在长戴接触镜的使用者中，严重不良反应的发生率较日配戴接触镜的使用者增加。研究还显示在摘下进行清洗和消毒或者抛弃和更换前的镜片配戴时间越长，则其严重不良反应将会增加。尚有研究显示吸烟者的不良反应发生率较高。如果您有任何眼部不适、流泪过多、视力改变、眼红等症状，请立即摘除接触镜并联系您的眼视光医师。建议隐形眼镜配戴者每年两次咨询您的眼视光医师，或者根据医师指示增加咨询频率。

使用情况说明：**浸泡和储存镜片：**

- 在每次储存镜片时，应以新鲜护理液装入镜片盒，请勿续满或重复使用护理液。您应在镜片从镜片盒中拿出时立即将护理液倒出。
- 请勿使镜片暴露或储存于任何成分的水（例如自来水、瓶装水、蒸馏水）或任何未消毒溶液中，或用之冲洗镜片盒。

警告：

- 每次使用后未倒出镜片盒中的溶液、续满溶液或用水护理镜片可引起污染，导致眼部病变和潜在视力下降。

揉搓和冲洗时间：

- 在接触镜每面各滴至少 3 滴护理液，并轻轻揉搓每面各 20 秒。
- 用护理液清洗镜片每面各 5 秒。

警告：

- 您应完全按照产品标签上推荐的镜片揉搓和冲洗时间进行操作，以充分消毒镜片和减少接触镜污染风险。揉搓或冲洗时间的减少可使镜片清洁变得不充分。
- 请勿使用水、生理盐水溶液或舒润眼液对接触镜进行消毒。这些溶液对镜片并无消毒作用。不使用推荐的护理液可导致严重感染、视力下降或失明。

镜片盒的护理：

- 第一次使用前，请使用接触镜护理液彻底地冲洗镜片盒和瓶帽。
- 在每次摘下镜片前，请首先清洁、冲洗并晾干您的镜片盒。可在晾干时倒转镜片盒使溶液流出。
- 请经常更换镜片盒，至少每三个月更换一次。

警告：

- 请勿使用水或其他非无菌溶液储存您的接触镜或冲洗镜片盒。仅可使用新鲜的多功能接触镜护理液，以免污染接触镜或镜片盒。使用非无菌溶液可导致严重感染、视力下降或失明。

涉水活动：

- 配戴时，接触镜不得与水接触。
- 请向您的眼视光医师咨询有关涉水活动期间配戴接触镜的建议。

丢弃日期：

- 请丢弃开封 90 天后还没用完的护理液。

警告：

- 使用超出丢弃日期的多功能接触镜护理液可能会导致镜片污染，且可导致严重感染、视力降低或失明。

重要安全信息：

- 在使用时请始终遵守产品说明。否则可能导致视力下降。
- 定期拜访您的眼视光医师。
- 在处理镜片前请务必洗净双手并擦干。
- 请勿使用自来水、瓶装水或唾液处理镜片或镜片盒。
- 仅使用新鲜护理液溶液清洁和消毒接触镜。
- 在每次消毒操作后请倒净镜片盒内的任何残余溶液。
- 生理盐水或舒润眼液对镜片并无消毒作用。
- 按照使用说明经常更换您的护理液、镜片和镜片盒。
- 请勿触摸容器顶端至任意表面以避免污染。使用后盖紧瓶盖。
- 请勿采用加热（热）消毒。

注意事项：

- 每次使用后请倒净镜片盒内剩余护理液溶液。

- 在不使用时保持瓶子密闭。
- 将护理液溶液于室温下储存。请勿冷冻。
- 在盒子和瓶子上打印的失效日期之前使用。
- 请丢弃开封 90 天后还没用完的护理液。
- 请置于儿童触及不到的地方。
- 如果瓶口塑封环破损或缺失，请勿使用。
- 护理液请勿直接滴入眼内。

不良反应（问题和解决方法）：可能会产生以下问题：眼部刺痛、灼烧感或刺激感（激惹症状）、与第一次配戴时相比舒适度下降、眼内异物感（异物、划破区）、流泪过多、眼部异常分泌物、眼红、视力敏感性下降（视敏度差）、视物模糊、虹视或光晕、对光敏感（畏光）或干眼。

如果您发现以上任何问题：

请立即摘下镜片。

- 如果不适症状消失，请仔细检查镜片。
- 如果镜片产生损坏，请勿配戴。将镜片放入镜片盒中，联系您的眼视光医师。
- 如果镜片变脏、有睫毛或其它异物，或者症状消失而且镜片外观并无损伤，则请彻底清洁、冲洗和消毒镜片，然后重新配戴。
- 如果症状持续存在，则请立即摘下镜片并咨询您的眼视光医师。

如果产生以上任何症状，则可能存在严重病变（如感染、角膜溃疡、新生血管化或虹膜炎）。请立即进行专业诊断和迅速治疗以避免严重眼部损伤。

当您前往眼视光医师处就诊以评估是否存在眼部感染时，请携带您的接触镜、护理液和镜片盒至预约就诊处，可能需要对其进行培养，以便更好地鉴别微生物。

镜片护理的好习惯：

- 请在接触镜片前洗手并用护理液冲洗手指。
- 在每次摘下镜片时进行清洁、冲洗和消毒。
- 一次接触一个镜片，左或右，以避免交叉感染。
- 在使用后，请经常清空并以新鲜的 **NNR06 多功能护理液** 冲洗镜片盒，然后将其晾干。

NNR06 多功能护理液 为无菌制剂，瓶身和外盒包装印有批号和失效日期。

®/TM are trademarks of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates

®/TM 均为博士伦有限公司及其关联方所有的商标

©Bausch & Lomb Incorporated

©博士伦有限公司

医疗器械注册证编号：国械注进 20213160213

产品技术要求编号：国械注进 20213160213

注册人/生产企业名称：博士伦有限公司 Bausch & Lomb Incorporated

注册人/生产企业住所：1400 North Goodman Street, Rochester, NY 14609, USA

生产地址：①8507 Pelham Road Greenville, SC 29615, USA; ② Bausch & Lomb-Iom Spa: Via Pasubio 34, Macherio, Monza Brianza, 20846, Italy.

代理人及售后服务单位名称：北京博士伦眼睛护理产品有限公司

代理人及售后服务单位住所：北京市东城区幸福大街 37 号

博士伦服务热线：400-060-9855 邮编：100061

有效期：两年

生产日期，使用期限或者失效日期见外包装

灭菌方式：过滤除菌

灭菌包装损坏后的处理方法：如果瓶口塑封环破损或缺失，请勿使用

符号解释说明：

	经无菌加工技术灭菌
	有效期
	批次代码
	可回收标志

说明书修订日期：2022 年 5 月