

产品名称：隐形眼镜润滑液
规格型号：8ml,8mlx2,8mlx3,8mlx4

润明新概念隐形眼镜润滑液是一种无菌的、防腐的溶液，推荐用于有效地润滑和再湿润软性（亲水性）角膜接触镜以便更加舒适地配戴镜片。

说明：

- 配戴过程中，需要时将两滴或三滴润滑液滴在角膜接触镜上，眨眼数次。
- 如果仍然感觉不舒适，再加一滴。
- 如果不适感持续存在，**立即**摘除镜片并联系您的眼视光医师。

成分：

无菌缓冲溶液，含有聚乙烯吡咯烷酮、依地酸二钠、山梨酸、硼酸、硼酸钠、氯化钠、氯化钾和纯水；防腐剂采用 0.1% 依地酸二钠和 0.1% 山梨酸。

作用：

润明新概念隐形眼镜润滑液对于再湿润日戴或长戴型镜片和抛弃型镜片或者定期更换型镜片来说都是理想的。如果您配戴长戴型镜片，则这一溶液可用于在睡眠后再湿润您的镜片。

适用范围：

适用于各类软性隐形眼镜（日戴型，抛弃型及连续配戴型等）的润滑、湿润作用

禁忌症（不使用的原因）：

如果您对这一产品中的任何成分过敏，请勿使用。

警告：角膜接触镜和镜片护理产品的问题可能对眼部造成严重的损伤。

遵循您的眼视光医师的指导和所有标签说明，对您的镜片和包括镜片盒在内的镜片护理产品进行正确使用和护理是至关重要的。眼部问题，包括角膜溃疡，可快速发展并导致视力丧失。日戴型镜片不适用于过夜配戴，并且不应当在睡觉时配戴。临床研究表明当这些镜片过夜配戴时严重不良反应的风险增加。长戴型镜片应当根据您的眼视光医师规定的时间定期摘除进行清洁和消毒或者进行抛弃和更换。临床研究表明与日戴型角膜接触镜用户相比，长戴型角膜接触镜用户中严重不良反应的发病率增高。研究也表明长戴型镜片在摘除进行清洁和消毒或者进行抛弃和更换之前配戴的时间越长，严重不良反应的风险越高。

研究也表明吸烟者具有更高的不良反应发病率。如果您出现眼部不适、过度流泪、视力改变、眼部发红，请立即摘除您的镜片并迅速联系您的眼视光医师。

建议角膜接触镜配戴者每年去其眼视光医师处进行两次检查，或者如果得到其指示，则可更加频繁。

- 为避免您的溶液或者您的镜片被污染：
请勿触摸容器顶端至任一表面。
使用后盖好瓶盖。
- 请勿将这一溶液转移到其它瓶子或容器中。
- 请勿采用热消毒。

注意事项：

- 每次摘除角膜接触镜后都要进行清洁、消毒、冲洗和浸泡。
- 不使用时请将瓶盖拧紧。
- 在室温下贮存该溶液
- 在外包装盒及瓶子上标注的失效日期之前使用。
- 避免儿童接触。

不良反应（症状和处理方式）：

可能出现以下症状：眼部刺痛、烧灼感或痒感（刺激性）、不如初次配戴时舒适、感觉眼内有东西（异物、刮伤区域）、流泪、眼部异常分泌物、眼红、视力急剧下降（视力差）、视物模糊、虹视或视物光晕、对光敏感（畏光），或眼干。

如果你注意到上述任何症状：

- **立即摘除您的镜片。**
- **如果不适症状消失，请仔细检查镜片。**
- **如果镜片产生损坏，请勿配戴。将镜片放入镜片盒中，联系您的眼视光医师。**
- **如果镜片变脏、有睫毛或其它异物，或者症状消失而且镜片外观并无损伤，则请彻底清洁、冲洗和消毒镜片，然后重新配戴。**
- **如果症状持续存在，则请立即摘下镜片并咨询您的眼视光医师。**

如果产生以上任何症状，则可能存在严重病变（如感染、角膜溃疡、新生血管化或虹膜炎）。请立即进行专业诊断和迅速治疗以避免严重眼部损伤。

使用说明：

- 请在接触镜片前洗手并用护理液冲洗手指。
- 在每次摘下镜片时进行清洁、冲洗和消毒。
- 总是按照相同顺序处理镜片，先右后左或先左后右，以避免混淆。
- 使用之后，总是倒空镜片盒并用新鲜冲洗溶液冲洗镜片盒并让其风干。
- 配戴抛弃型镜片时，每次摘除镜片后将其丢弃并更换新的镜片。
- 建议开封后 180 天内用完。

提供方式：

博士伦润明新概念隐形眼镜润滑液以 8 ml 塑料瓶包装，供购买。瓶子和外包装盒上标记有批号和失效期。

有效期：自生产之日起两年。

生产日期和失效日期请见外盒包装。

灭菌方式：

本品为无菌加工产品，如密封薄膜破损或丢失，请勿使用。

®/TM 均为博士伦有限公司及其关联机构商标。

©博士伦公司所有

注册证号：国械注进 20153161125

产品技术要求编号：国械注进 20153161125

注册人和生产企业名称：**Bausch & Lomb Incorporated**
博士伦有限公司

注册人和生产企业住所：**1400 North Goodman Street,**
Rochester, NY 14609, USA

生产地址：**8507 Pelham Road, Greenville, SC**
29615, USA

代理人名称：北京博士伦眼睛护理产品有限公司

代理人住所：北京市东城区幸福大街 37 号

售后服务单位：北京博士伦眼睛护理产品有限公司

山东博士伦福瑞达制药有限公司

博士伦服务热线：400-060-9855

网址：www.bausch.com.cn

说明书修订日期：2020 年 3 月